

GEBRAUCHSANWEISUNG

Produkt: Gesichtsschutzschild
(Face Shield)
Artikelnummer: 2002



HAWICO
PROTECTIVE TECHNOLOGIES

Nr.	Teil
1	Visierhalterung aus ABS
2	Stirnpolster aus PE-Schaum
3	Elastisches Kopfband, gewebt
4	Visier aus Polyesterfolie



Zum Schutz vor Tropfen und Spritzern von Flüssigkeiten, entwickelt gegen das Coronavirus

Stand: 20.05.2020

KLASSIFIZIERUNG UND ANWENDUNGSHINWEISE

1. EG-konformes Medizinprodukt der Klasse I nach der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte.
 2. Zertifiziert als Gesichtsschutzschild nach EN 166 Kategorie II der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).
- Das Gesichtsschutzschild wurde und wird insbesondere für medizinische Fachkräfte und Mitarbeiter von Rettungsdiensten für die Dauer der Coronavirus-Gesundheitsbedrohung entwickelt und produziert.
 - Für diverse Bereiche des öffentlichen Lebens geeignet.
 - Das Gesichtsschutzschild bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung.
 - Das Gesichtsschutzschild schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben (nach EN 166, Absatz 7.2.4).
 - Das Gesichtsschutzschild ist kombinierbar mit Schutzbrillen, persönlichen korrigierenden Brillen und Atemschutzmasken.
 - Das Gesichtsschutzschild ist nach Gebrauch zu entsorgen. Eine Wiederverwendung nach Desinfizierung liegt im Ermessen des Anwenders.
 - Kein Teil des Gesichtsschutzschildes ist dafür bekannt, für den Benutzer schädlich zu sein und es ist auch nicht bekannt, dass ein Teil Hautreizungen verursacht. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können.
 - Zerkratzte oder anderweitig beschädigte Visiere sollten insbesondere bei längeren Tragezeiten ausgetauscht werden, um die Augen nicht übermäßig zu belasten.

HINWEISE ZUR LAGERUNG

- Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden.
- Bei kontaminierten Produkten sind die Art und das Ausmaß der Kontamination ausschlaggebend für die Entsorgung.
- Die geltenden Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.

WARNUNG

Nicht für die folgenden Zwecke geeignet:

- zum Schutz gegen mechanische Einwirkung
- zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art
- gegen Funken, Bestrahlung oder ultraviolette Strahlen
- beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten
- Die Visiermaske kann nur bei ordnungsgemäßer Montage und richtiger Anpassung die bezweckte Sicherheit gewährleisten. Abnehmbare Teile dürfen nicht separat getragen werden.

NOTIFIZIERTE STELLE

ECS GmbH – European Certification Service; Hüttenfeldstraße 50, 73430 Aalen, Germany
Notifizierte Stelle 1883, EU-Baumusterprüfbescheinigung C2950.2HAWICO

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

In Fällen einer nicht bestimmungsgemäßen oder nicht sachgerechten Verwendung des Produkts übernimmt die HAWICO UG (haftungsbeschränkt) keine Haftung. Auswahl und Nutzung des Produkts liegen in der ausschließlichen Verantwortung der handelnden Personen. Produkthaftungsansprüche, Gewährleistungsansprüche und Ansprüche aus etwaigen von der HAWICO UG (haftungsbeschränkt) für dieses Produkt übernommenen Garantien verfallen, wenn es nicht entsprechend der Gebrauchsanleitung eingesetzt wird.

HAWICO UG (haftungsbeschränkt)
Weidenauer Str. 167, 57076 Siegen
Amtsgericht Siegen, HRB 12193

info@hawico.de
www.hawico.de

AUFBAUANLEITUNG und TRAGEEMPFEHLUNG

Produkt: Gesichtsschutzschild (Face Shield)

Artikelnummer: 2002



Mit Hilfe der Links- und Rechtskennzeichnung auf die Ausrichtung (oben/unten) des Visierhalters achten!

1. Stirnpolster

- Schutzfolie von der Klebefläche des Stirnpolsters abziehen
- Stirnpolster entlang der Innenseite des Visierhalters ankleben



- Gleichmäßig andrücken

2. Gummiband (elastisches Kopfband)

- Gummiband von unten in den mit einer „1“ gekennzeichneten Schlitz einfädeln




- Gummiband von oben in den mit einer „2“ gekennzeichneten Schlitz einfädeln



- Die obigen Schritte auf der zweiten Seite wiederholen

3. Visier

- Visierfolie an den vier Pilzzapfen befestigen, beginnend auf einer Seite

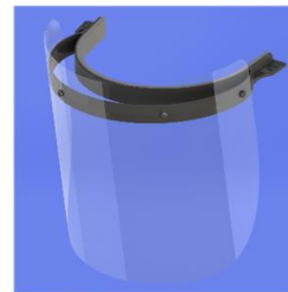

Trageempfehlung

Für einen bestmöglichen Schutz halten Sie sich bitte an folgende Trageempfehlung:

- Der Visierhalter sollte mittig auf der Stirn getragen werden.
- Das Gummiband sollte um den Hinterkopf gespannt getragen werden.
- Das Visier sollte sich relativ parallel zum Gesicht befinden, d.h. der Abstand zwischen Visier und Kinnbereich sollte nicht übermäßig groß sein.
- Das Gummiband sollte so eingestellt sein, dass das Gesichtsschutzschild auch bei Bewegung sicher und fest sitzt.
- Das Gummiband sollte jedoch nicht so eingestellt sein, dass das Gesichtsschutzschild unangenehm drückt.
- Das HAWICO Gesichtsschutzschild ist kombinierbar mit Schutzbrillen, persönlichen korrigierenden Brillen und Atemschutzmasken.